

PneumoMed Journal

Von Pneumologen
für Pneumologen



in Kooperation mit



Vitalograph ECO Bakterien-Viren-Filter - Neues Vertragsmodell -

Best-Preis-
Garantie**

Niedrigere
Einstiegs Mengen

Auch für
Bestandskunden

Ihre
Vorteile

Flexibles
Vertragsmodell
ohne Risiko

Bequeme,
zuverlässige
Versorgung

Warum genau jetzt wechseln?

Neues Preismodell mit Best-Preis-Garantie für Vitalograph-Filter

Sie erhalten durch die Kooperation mit unserem Partner Vitalograph das brandneue Vertragsmodell mit verbesserten Konditionen und einer Best-Preis-Garantie für die ECO Bakterien-Viren-Filter!

Niedrigere Einstiegsmengen für kleinere Praxen

Das neue Modell hilft nicht nur großen Praxen dank der günstigen Preise wirtschaftlich zu profitieren, sondern ermöglicht insbesondere jetzt auch kleineren Praxen durch kleinere Einstiegsmengen sich einen signifikanten Preisvorteil zu sichern!

Bequeme, dauerhafte Versorgung ohne ständig neue Vertragsabschlüsse

Um Ihren täglichen, hektischen Praxisalltag zu entlasten, müssen Sie sich künftig nicht mehr um neue Lieferverträge kümmern. Vitalograph versorgt Sie dauerhaft günstig und zuverlässig mit Ihren ECO Bakterien-Viren-Filtern. Bei Bedarf beliefert unser Partner Sie gerne auch ganz automatisch in Ihrem Wunschrhythmus mit Ihrer Wunschmenge.

Flexibles Vertragsmodell ohne Risiko dank monatlicher Kündbarkeit


Die Vereinbarung kann zum Ende der ersten 12 Monate nach erfolgter Abnahme der Bestellmenge oder jederzeit danach flexibel mit einer Frist von einem Monat beidseitig gekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung gilt ein Kündigungsrecht für die Praxis innerhalb von 30 Tagen nach Mitteilung.

Natürlich auch für unsere Bestandskunden

Sie können ab sofort Ihre bestehende Abnahmevereinbarung auf die neuen Konditionen umstellen.

Sie sind noch an einen anderen Lieferanten gebunden?

Kein Problem! Nennen Sie uns einfach Ihr gewünschtes Datum für die Erstbelieferung nach Ablauf Ihrer Vertragsbindung. Es gibt keinen guten Grund mehr, außerhalb Ihrer Genossenschaft Filter zu kaufen.

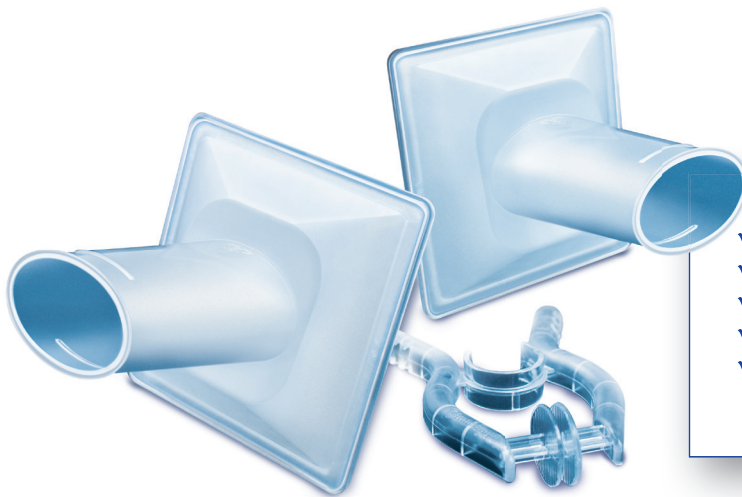

- ✓ 100% Messgenauigkeit auf allen Bodys
- ✓ 99,999% Filtration (SARS-CoV-2, Influenza, etc.)
- ✓ 80% weniger Energieverbrauch bei Herstellung*
- ✓ 54% weniger Filterabfall*
- ✓ 100% bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

*Im Vergleich zum Vitalograph Standard-BVF 28363

Mir ist bekannt und ich willige ausdrücklich ein, dass die PneumoMed eG meine Daten verarbeitet, Art. 4 DSGVO, und zum Zwecke der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses an das genannte Unternehmen weiterleitet. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass die PneumoMed e.G. meine Daten zur Information per E-Mail oder für Newsletter bzw. sonstige fachbezogene Werbung nutzt, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Meine Rechte als Betroffene/r sind mir bekannt. Weitere Hinweise zum Datenschutz und die Datenschutzerklärung der PneumoMed eG finde ich auf der Homepage unter www.pneumomed-eg.de.

Impressum:

Herausgeber: PneumoMed eG Geschäftsstelle, c/o med info GmbH, Hainenbachstr. 25, 89522 Heidenheim, Tel.: 07321 94691-0, Fax: 07321 94691-40, E-Mail: info@med-info-gmbh.de;

Vorstand: Dr. Patrick Albrecht, Dr. Andreas Hellmann, Frank Wallbrecht; Vorsitzender des Aufsichtsrates: Sebastian Böing;

Kreissparkasse Heidenheim: IBAN DE63 6325 0030 0000 6311 70 • BIC SOLADES1HDH; Genossenschaftsregister Ulm: GnR 66 00 64

Bildnachweise: Vitalograph GmbH

ECO-Lungenfunktionsfilter

Ihre Genossenschaft, die PneumoMed eG hat aufgrund der aktuell starken Nachfrage bedingt durch Covid-19 eine neue Einkaufsaktion mit der Firma Vitalograph initiiert. Deren neuer ECO-Filter ist nachhaltig, sicher und preiswert.

Es gibt keinen Grund mehr, Filter außerhalb unserer Genossenschaft zu kaufen. Machen Sie mit!

Ihre Patienten haben in Anbetracht der aktuellen Covid-19 Lage ein sicheres Gefühl, denn die Bestätigung der Fa. Vitalograph, das auch ein Schutz gegenüber SARS-CoV-2 besteht, liegt uns vor.

**Covid-19
Schutz!**



Vitalograph (Ireland) Limited, Gort Road Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland
Telephone: 065 686 4100 Fax: 065 682 9289

Certificate of Cross-Infection Efficiency

This is to certify that Vitalograph BVF (Bacterial Viral Filters for Respiratory Function Testing) Model No. 2820 have the Bacterial Filter Efficiency (BFE) and Viral Filter Efficiency (VFE) stated below.

| | |
|--|--------------|
| BFE (MRSA, TBC, etc) | > 99.999996% |
| VFE (Influenza, HN1, SARS-CoV-2/-1 etc.) | > 99.999711% |

Frank Keane

CEO

19th March 2020

Häufig gestellte Fragen

Ist der NEUE Vitalograph ECO-Filter für Bodyplethysmographen aller Hersteller geeignet?

Der NEUE ECO-BVF™ ist geeignet für Bodyplethysmographen von Ganshorn, Vyaire/Jaeger/CareFusion, ZAN/nSpire, Lemon Medical/MEE und Medisoft.

Sollten auch bei beheizbaren Messköpfen Filter eingesetzt werden?

Beheizbare Messköpfe dienen primär der Präzisierung der Messergebnisse bei einigen Herstellern, weniger der Hygiene. Die entsprechenden Messköpfe werden meist auf Körpertemperatur von ca. 37 Grad Celsius erwärmt. Eine Reduktion von Bakterien und Viren ist durch diese Erwärmung nicht zu erwarten, der Einsatz von Filtern ist daher sinnvoll.

Müssen Hersteller der Bodyplethysmographen den Vitalograph Filter für deren Geräte „freigeben“?

Hersteller von Bodyplethysmographen versuchen natürlich ihren Markt zu schützen und empfehlen die Verwendung ihrer eigenen Filter. Wie in nahezu allen Bereichen – vom Medizinprodukt bis zum heimischen Tintenstrahldrucker – ist das Originalzubehör der Hersteller jedoch meist deutlich teurer als qualitativ gleichwertige Generikprodukte, beispielsweise der Vitalograph-Filter. Als einer der größten und international führenden Filterhersteller hat Vitalograph seine Filter ausgiebig getestet. Alle relevanten Zertifizierungen gemäß europäischer Medizinprodukte-Richtlinie 2007/47/EC, CE etc. liegen vor.

Der NEUE Vitalograph ECO-Filter ist für alle Bodys geeignet und muss nicht von den Herstellern „freigegeben“ werden.

Dürfen Body-Hersteller bei Nutzung von Fremdfiltern die Garantie einschränken?

Eine generelle Einschränkung der Garantie würde bei Nutzung eines geeigneten Filters gegen das EU-Wettbewerbsrecht verstoßen.

Werden durch den Einsatz von Filtern die Messwerte verfälscht?

Um Messergebnisse von Spirometern/Bodyplethysmographen beim Einsatz von Bakterien-Viren-Filtern nicht zu verfälschen, ist insbesondere auf folgende Punkte zu achten:

1. Flusswiderstand (Flow Impedance) des Filters: Vitalograph Filter unterschreiten deutlich den nach internationalem ATS/ERS-Spirometrie-Standard zulässigen Höchstwert für den Widerstand; mit einer Verfälschung der Messergebnisse ist daher nicht zu rechnen.

2. Totraum des Filters: Der NEUE ECO-BVF™ hat mit 55ml einen vergleichsweise kleinen Totraum; mit einer Verfälschung der Messergebnisse ist dabei nicht zu

rechnen. Theoretisch kann man in der PC-Software aller Bodyplethysmographen den Totraum ändern/einstellen, jedoch ist dies aufgrund des kleinen Totraumes beim ECO-BVF™ in der Regel nicht nötig/anzuraten.

Was sind LuFu-Sets?

Viele Hersteller bieten Einmal-LuFu-Sets, bestehend aus Filter und Nasenklemme an. Der Einsatz von Sets ist nicht unbedingt notwendig, aber sinnvoll. Die Einzelkomponenten sind bereits zusammen in Polybeuteln zeitsparend konfektioniert und am Gerät schneller einsetzbar. Der Trend geht herstellerübergreifend zu preiswerten Nasenklemmen, welche wie Filter aus Hygienegründen als Einmal-Artikel gekennzeichnet sind. Der Aufwand für die Aufbereitung der Klemmen entfällt.



Kann ein Filter für mehrere Patienten verwendet werden?

Filter sind zum Gebrauch durch einen Patienten innerhalb eines Besuches vorgesehen. Die Elektrostatik jedes Filters reduziert sich mit jedem Atemmanöver und nach einer gewissen Zeit erfüllt der Filter seinen Zweck nicht mehr. Der Filter dient dann bestenfalls zum rudimentären Schutz der Apparatur vor mechanischen Verschmutzungen. Es muss für jeden Patienten ein neuer Filter bei jedem Besuch benutzt werden.

Passen ggf. vorhandene Beissmundstücke auf Vitalograph Filter?

Dank der längeren Mundstücksektion mit spezieller Plastik-Beisskante werden teure Silikon-Beissmundstücke beim NEUEN ECO-BVF™ überflüssig. Sollten sie in Ausnahmefällen dennoch gewünscht werden, können sie kostengünstig bei Vitalograph bestellt werden.

Wird für den NEUEN ECO-BVF™ ein Adapter benötigt?

Meist passt der Filter ohne Adapter. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, stellt Vitalograph mit Erstlieferung den Pass sicher.

| Jahresmenge | ECO Bakterien-Viren-Filter | | | ECO Bakterien-Viren-Filter Set (Filter & Nasenklemme) | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---------------|
| | Listenpreis (Preis pro Filter) | PneumoMed-Preis (Preis pro Filter) | Bestellmenge* | Listenpreis (Preis pro Set) | PneumoMed-Preis (Preis pro Set) | Bestellmenge* |
| ab 3.600 Stück | 0,88 € | 0,54 € | | 0,98 € | 0,60 € | |
| ab 10.800 Stück | | 0,49 € | | | 0,55 € | |

*Die Bestellmenge muss durch 600 teilbar sein und wird entsprechend aufgerundet.
 **Für Vitalograph Filter an pneumologische Praxen innerhalb Deutschlands.
 Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und 10,90 € Versandkosten.

Die Abnahme und Berechnung der gewünschten Bestellmenge erfolgt anteilig in Teillieferungen innerhalb von 12 Monaten. Die Bestellung begründet eine Rahmenvereinbarung, die sich nach Ablauf und/oder vorzeitiger Abnahme zu gleichen Konditionen automatisch verlängert. Die Vereinbarung kann zum Ende der ersten 12 Monate (nach erfolgter Abnahme der Bestellmenge) oder jederzeit danach mit einer Frist von einem Monat beidseitig gekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung gilt ein Kündigungsrecht für die Praxis innerhalb von 30 Tagen nach Mitteilung.

Ich bin Neukunde.

Ich bin Bestandskunde und möchte auch von diesen neuen Konditionen profitieren.

Bitte stellen Sie unsere bestehende Abnahmevereinbarung entsprechend um. Liegt unsere noch offene Abnahmemenge aus bestehender Vereinbarung über der oben von uns gewünschten Bestellmenge, übernehmen Sie bitte einfach unsere noch offene Abnahmemenge.

Wunschmenge pro Teillieferung: 600 Stück 1.200 Stück 1.800 Stück

Lieferrhythmus: auf Abruf Erstlieferung zu sofort/ zum _____
 automatisch alle ____ Wochen oder zum Monatsanfang

Ansprechpartner(in) für Rückfragen mit Durchwahl: _____

Hersteller Ihres Bodys: _____

Ich bin Mitglied in der PneumoMed eG

Bitte senden Sie mir den Mitgliedsantrag der PneumoMed eG zu.

Vertragspartner:
 Vitalograph GmbH
 Rellinger Straße 64a
 20257 Hamburg
 Telefon: +49 40 547 391 15
 Fax: +49 40 547 391 40
 E-Mail: info@vitalograph.de
 Homepage: www.vitalograph.de

 Klinik/Praxis Titel, Vorname, Name

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

 Telefonnummer Faxnummer

 Datum, Unterschrift E-Mail-Adresse

Praxisstempel